

EA everall7



VILLACRYL

Стоматологические материалы из акрила

---

# Стоматологические материалы из акрила

Акриловые материалы линии **VILLACRYL** облегчают работу зубного техника и позволяют легко и быстро изготавливать высококачественные зубные протезы.



**Линия Villacryl** — это акриловые смолы, которые используются в традиционных методах протезирования. Высокая прочность и устойчивость к излому, а также различные цвета и степени прозрачности, высокая стабильность материала и биосовместимость с мягкими тканями способствуют большему комфорту пациента.



Если для Вас важна эффективность работы — это Ваш идеальный выбор!





# VILLACRYL H PLUS



ОПИСАНИЕ

**Villacryl H Plus** – это стоматологический материал горячей полимеризации, предназначенная для изготовления полных и частичных пластинчатых протезов, а также для непрямой перебазировки съемных протезов. Материал, лёгкий в приготовлении и обработке, обеспечивает быструю полимеризацию.

- Совместимость с мягкими и твердыми материалами для перебазировки протезов,
- Стабильность цвета,
- Высокая эстетика реставрации,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален,
- Высокая механическая прочность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1:2013 „Стоматология – Полимеры на основные пластины — часть 1: Полимеры для основных пластин зубных протезов“.

<b>Пропорция смешивания</b>	24 гр. порошка/10 гр. (10,5 мл) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	20-25 мин (в темп. 23°C)
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	25-30 мин. (в темп. 23°C)
<b>Время полимеризации</b>	30 мин. — 60°C + 100°C 30 мин. — 100°C 30 мин. — охлаждение на воздухе
<b>Устойчивость к излому</b>	> 65* МПа
<b>Растворимость</b>	< 1,6* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Цвета

- 0** - бесцветный
- V2** - молочно-розовый с прожилками
- V3** - темно-розовый с прожилками
- V4** - розовый с прожилками
- T4** - розовый

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>0</b> V1000Z02: 750 г + 400 мл	V1000P04: 750 г V1000P03: 4 кг
V100V2Z09: 750 г + 400 мл	V100V2P19: 300 г V100V2P18: 750 г V100V2P17: 2 кг V100V2P10: 4 кг
<b>V2</b>	
<b>V3</b> V100V3Z11: 750 г + 400 мл	-
V100V4Z12: 750 г + 400 мл	V100V4P15: 750 г V100V4P13: 2 кг V100V4P14: 4 кг
<b>V4</b>	
<b>T4</b> V100T4Z08: 750 г + 400 мл	V100T4P10: 4 кг

## Жидкость

- V100L06: 400 мл
- V100L05: 1 л



# VILLACRYL H RAPID



ОПИСАНИЕ

Стоматологический материал **Villacryl H Rapid** ускоренной горячей полимеризации был создан специально для того, чтобы максимально сократить время технологического процесса в зуботехнической лаборатории. С его помощью можно изготавливать пластины съемных протезов, полных или частичных, а также непрямую перебазировку протезов. Быстрая полимеризация – сокращает время полимеризации почти вдвое.

- Общее время изготовления протеза сокращается примерно на 60 мин,
- Сохранение пластичной консистенции акрилового теста во время помещения его в полимеризационную кювету,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1:2013 „Стоматология – Полимеры на основные пластины — часть 1: Полимеры для основных пластин зубных протезов”.

<b>Пропорция смешивания</b>	24 гр. порошка / 10 гр. (10,5 мл) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	8-10 мин.
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	20 мин.
<b>Время полимеризации</b>	10 мин. — 80°C → 100°C 20 мин. — 100°C 20 мин. — охлаждение на воздухе
<b>Устойчивость к излому</b>	> 65* МПа
<b>Растворимость</b>	< 1,6* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Цвета

- 0** - бесцветный
- V2** - молочно-розовый с прожилками
- V4** - розовый с прожилками

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>0</b> V110Z01: 750 г + 400 мл	-
<b>V2</b> V110V2Z05: 750 г + 400 мл	-
<b>V4</b> V110V4Z07: 750 г + 400 мл	V110V4P11: 750 г V110V4P08: 2 кг V110V4P09: 4 кг

## Жидкость

V110L04: 400 мл
V110L02: 1 л



# VILLACRYL H RAPID FN



ОПИСАНИЕ

Стоматологический материал **Villacryl H Rapid FN** ускоренной горячей полимеризации был создан специально для того, чтобы максимально сократить время технологического процесса в зуботехнической лаборатории. С его помощью можно изготавливать пластины съемных протезов, полных или частичных, а также непрямую перебаривку протезов. Быстрая полимеризация сокращает время полимеризации почти вдвое.

- Общее время изготовления протеза сокращается примерно на 60 мин,
- Сохранение пластичной консистенции акрилового теста во время помещения его в полимеризационную камеру,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1:2013 „Стоматология – Полимеры на основные пластины — часть 1: Полимеры для основных пластин зубных протезов”.

<b>Пропорция смешивания</b>	23 г порошка / 10 г (10,5 мл) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	8-10 мин. (темп. 23°C)
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	20 мин. (темп. 23°C)
<b>Время полимеризации</b>	10 мин. — 80°C → 100°C 20 мин. — 100°C 20 мин. — охлаждение на воздухе
<b>Устойчивость к излому</b>	> 65* МПа
<b>Растворимость</b>	< 1,6* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Цвета

**V4** - розовый с прожилками

## Упаковки

Наборы	Жидкость
<b>V4</b> V260V4Z01 (750 г + 400 мл)	V260L01 400 мл



# VILLACRYL SP



ОПИСАНИЕ

**Villacryl SP** — это полимерный стоматологический материал холодной полимеризации для изготовления акриловых деталей в бюгельных, полных и частичных протезах методом литья с использованием гидроколлоидных масс, силиконов для предварительного пломбирования и силиконов для дублирования. Также подходит и для ремонта не прямой перебазирующей.

- Быстрое изготовление протеза методом литья при помощи силиконовой матрицы,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Отлично маскирует металлические элементы протеза,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1:2013 „Стоматология – Полимеры на основные пластины — часть 1: Полимеры для основных пластин зубных протезов“.

	акриловые части бюгельных протезов	полный съемный протез методом литья
<b>Пропорции смешивания</b>	10 г порошка/ 7 мл (6,5 г) жидкости	10 г порошка/ 52 мл (5 г) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	60-90 сек (23°C)	30-60 сек (23°C)
<b>Время полимеризации</b>	50-60°C Минимум 20 мин 2 бар	60°C 30 мин 2 бар
<b>Устойчивость к излому</b>	> 60* МПа	
<b>Растворимость</b>	< 8* µg/мм <sup>3</sup>	
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>	

## Цвета

- 0** - бесцветный
- V2** - молочно-розовый с прожилками
- V4** - розовый с прожилками

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>0</b> V1200Z01: 500 г + 300 мл	-
<b>V2</b> V120V2Z03: 500 г + 300 мл	-
<b>V4</b> V120V4Z04: 500 г + 300 мл	V120V4Z05: 500 г

Пłyn
V120L06: 300 мл



# VILLACRYL S



ОПИСАНИЕ

**Villacryl S** — самоотверждающийся полимерный стоматологический материал предназначенный для починки протезов и их непрямо́й перебазировки.

- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Быстрота в изготовлении благодаря прекрасному соединению с материалами горячей полимеризации,
- Цветовая гамма гарантирует превосходную эстетическую починку,
- Не содержит тяжёлых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1:2013 „Стоматология – Полимеры на основные пластины — часть 1: Полимеры для основных пластин зубных протезов“.

<b>Пропорция смешивания</b>	10 г порошка / 5,3 мл (5 г)
<b>Время приготовления теста</b>	8 мин
<b>Время полимеризации</b>	Минимум 20 мин. 50-60°C 2 бар
<b>Устойчивость к излому</b>	> 60* МПа
<b>Растворимость</b>	< 8* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>0</b> V1300Z01 100 г + 50 мл	-
<b>V2</b> V1300V2Z04 100 г + 50 мл	-
<b>V4</b> V1300V4Z05 100 г + 50 мл	V130V4P06 1 кг
<b>T4</b> V1300T4Z03 100 г + 50 мл	-

Жидкость
V130L02: 200 мл
V130L07: 500 мл

## Цвета

- 0** - бесцветный
- V2** - молочно-розовый в прожилках
- V4** - розовый в прожилках
- T4** - розовый



# VILLACRYL IT



ОПИСАНИЕ

**Villacryl IT** — это стоматологический полимерный материал предназначенный для изготовления индивидуальных слепочных ложек.

- Твёрдый и стабильный,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Пригоден к работе сразу после смешивания,
- Нелипнет к рукам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

Пропорция смешивания	21 г порошка / 6 мл (5,6 г) жидкости
Время приготовления теста	1 мин
Время пригодности теста к использованию	4-5 мин (23°C)
Время полимеризации	8-12 мин
Устойчивость к излому	>15* МПа

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>ЗЕЛЁНЫЙ</b> V14OZZ04 750 г + 200 мл	V14OZP02 750 г
<b>РОЗОВЫЙ</b> V14ORZ03 750 г + 200 мл	-

Жидкость
V14OZL01 200 мл

## Цвета

- Зелёный
- Розовый



# VILLACRYL ORTHO



ОПИСАНИЕ

**Villacryl Ortho** — бесцветный стоматологический полимерный материал холодной полимеризации, предназначенный для изготовления съемных ортодонтических аппаратов методом насыпания порошка на модель и заполнением мономером (методом „salt and pepper”), а также для починки ортодонтических аппаратов.

- Возможность индивидуального создания цвета любой насыщенности,
- Экономный – для получения широкой гаммы цветов и оттенков достаточно добавить в мономер цветовой концентрат,
- Низкая всасываемость жидкости из полости рта,
- Биологически нейтрален,
- Благодаря быстрому гелеобразованию массы не стекает с гипсовой модели,
- Идеально прозрачная акриловая масса,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-2:2013 „Стоматология. Основные полимеры. Часть 2. Основные полимеры для ортодонтии”.

<b>Время полимеризации</b>	20 мин 50-60°C 2 бар
<b>Устойчивость к излому</b>	> 50* МПа
<b>Растворимость</b>	< 5* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Упаковки

Наборы	Порошок
0 V160Z01: 500 г + 250 мл + 3 x 12 мл	V1600P07: 500 г V1600P05: 2 кг V1600P06: 4 кг

### Жидкость

V160L03: 250 мл
V160L04: 500 мл
V160L02: 1 л

## Цвета

0 - бесцветный



# VILLACRYL ORTHO MIX



ОПИСАНИЕ

**Villacryl Ortho MIX** — бесцветный стоматологический полимерный материал холодной полимеризации, предназначенный для изготовления съёмных ортодонтических аппаратов методом насыпания порошка на модель и заполнением мономером (метод „salt and pepper”), а также для починки ортодонтических аппаратов.

- Экономный — для получения широкой гаммы цветов и оттенков достаточно добавить в мономер цветовой концентрат,
- Высокая механическая прочность,
- Биологически нейтрален,
- Универсальность применения в зуботехнической лаборатории,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-2:2013 „Стоматология. Основные полимеры. Часть 2. Основные полимеры для ортодонтии”.

<b>Пропорция смешивания</b>	24 г порошка / 10 мл жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	6-7 мин
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	ок. 15 мин
<b>Время полимеризации минимум</b>	20 мин 45-55°C 2 бар
<b>Устойчивость к излому</b>	> 50* МПа
<b>Растворимость</b>	< 5* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Упаковки

### Наборы

0 V170Z01: 500 г + 250 мл + 3 x 12 мл

### Цвета

0 - бесцветный

ОПИСАНИЕ

Концентраты цвета для **Villacryl Ortho** позволяют изготовить ортодонтический аппарата в любом цвете.

- 8 цветов, дающих возможность создавать промежуточные цвета.

- Использование концентратов цвета даёт возможность создать свой индивидуальный цвет произвольной насыщенности,
- Цвета аппаратов, изготовленных при помощи Villacryl Ortho с использованием разных концентратов цвета, очень эстетичны и обладают стабильностью расцветки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## VILLACRYL ORTHO КОНЦЕНТ РАТЫЦВЕТА

### Цвета

- V1809P08:** голубой 50 мл
- V1808P07:** светло-зелёный 50 мл
- V1807P06:** тёмно-зелёный 50 мл
- V1806P05:** фиолетовый 50 мл
- V1805P04:** малиновый 50 мл
- V1804P03:** красный 50 мл
- V1803P02:** оранжевый 50 мл
- V1802P01:** жёлтый 50 мл



# VILLACRYL STC HOT



ОПИСАНИЕ

**Villacryl STC HOT** — это полимерный материал горячего отверждения, предназначенный для облицовки коронок и мостовидных протезов.

- Быстрая полимеризация,
- Возможность изготовления временных коронок и мостовидных протезов,
- Возможность облицовки металлических конструкций,
- Естественность реставрации,
- Оптимальная прочность и гибкость,
- Цвета полимера, которые максимально приближены к шкале оттенков VITA®, прекрасно сочетаются с оттенком зубов пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 10477:2008 „Полимерные материалы для коронок и мостовидных протезов“.

<b>Пропорция смешивания</b>	2,4 г порошка / 1 мл (1 г) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	8 -10 мин
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	20 мин
<b>Время полимеризации</b>	10 мин – 80°C + 100°C 30 мин – 100°C
<b>Растворимость</b>	< 7,5* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 40* µg/мм <sup>3</sup>

## Цвета

согласно Vita® Classic

- A1 • A2 • A3 • A3,5 • A4
- B1 • B2
- C2 • C4
- D2

## Упаковки

Наборы	
V210Z11: Villacryl HOT	
<b>A1</b>	V210A1Z01: 80 г + 40 мл
<b>A2</b>	V210A2Z02: 80 г + 40 мл
<b>A3</b>	V210A3Z03: 80 г + 40 мл
<b>A3,5</b>	V210A35Z04: 80 г + 40 мл
<b>B1</b>	V210B1Z06: 80 г + 40 мл
<b>B2</b>	V210B2Z07: 80 г + 40 мл
<b>C2</b>	V210C2Z08: 80 г + 40 мл
<b>C4</b>	V210C4Z09: 80 г + 40 мл
<b>D2</b>	V210D2Z12: 80 г + 40 мл



# VILLACRYL STC



ОПИСАНИЕ

**Villacryl STC** — Самоотвердеющий стоматологический полимерный материал, предназначен для изготовления временных коронок и мостов, а также для временных починок коронок и мостов, облицованных акрилом. Материал в виде порошка и жидкости. Предварительное формирование коронки / моста и отверждение материала происходит непосредственно в ротовой полости пациента.

- Максимальная температура отверждения в ротовой полости пациента составляет всего лишь 37°C,
- Прост в употреблении в кабинете стоматолога,
- Эстетичные цветовые оттенки,
- Низкая температура самоотверждения,
- Короткое время самоотверждения,
- Хорошая переносимость пациентами,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтральный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

<b>Пропорция смешивания</b>	2 г порошка / 1,0 мл (1,0 г) жидкости
<b>Время приготовления теста</b>	30 сек
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	90 сек
<b>Время отверждения во рту пациента</b>	4 мин
<b>Время полимеризации</b>	15 мин – 50-65°C с добавлением отвердителя 2 г / 200 мл воды
<b>Максимальная температура во время полимеризации в ротовой полости</b>	37°C

## Цвета

(оптимально приближены к цветам VITA® A-1, A-3, A-4)

- 1
- 2
- 3

## Упаковки

### Наборы

V200Z05 порошок 3 x 20 г, жидкость 40 мл, отвердитель 40 г



# VILLACRYL HARD



ОПИСАНИЕ

**Villacryl Hard** — Полимерный материал холодного отверждения. Материал предназначен для временной перебазировки протезов непосредственно в ротовой полости пациента.

- Низкая температура полимеризации в ротовой полости пациента,
- Удобен в использовании в стоматологической кабине,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Позволяет на быструю перебазировку протеза,
- Хорошо соединяется с базисом протеза,
- Обеспечивает пациенту комфортное пользование протезом,
- Не содержит тяжёлых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

<b>Пропорции смешивания</b>	2,35 г порошка / 1,5 мл (1,3 г) жидкости
<b>Время пригодности теста к использованию</b>	90 сек
<b>Процесс полимеризации в ротовой полости пациента</b>	2 мин
<b>Время полимеризации согласно инструкции</b>	30 мин – 50-60°C с добавлением отвердителя 2 г / 200 мл
<b>Твёрдость</b>	72 Shore'D

## Упаковки

### Наборы

V190Z02 60 г + 40 мл + 10 мл

## Цвета

- Розовый

# АКРИЛЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

## 1. Акриловое вещество не полимеризуется

Каждый материал спроектирован таким образом, чтобы после процесса полимеризации были получены определенные параметры. Для правильного прохождения процесса полимеризации акрилового вещества необходимо придерживаться рекомендаций производителя, которые касаются соотношения пропорций порошка к жидкости и параметров процессов полимеризации таких как время и температура, описанных в инструкции употребления каждого продукта.

## 2. Очень длительное время ожидания готовности теста

Временные промежутки, поданные в инструкции употребления, относятся к пропорции смешивания порошка с жидкостью при комнатной температуре (23°C). Следует придерживаться рекомендуемых пропорций смешивания и иметь ввиду, что температура как компонентов, так и окружающей среды влияют на первые фазы полимеризации вещества. Более низкая температура продлевает, а более высокая сокращает время ожидания готовности теста.

## 3. Неправильный цвет протеза

Изменение цвета акрилового материала может возникнуть из-за неправильных пропорций порошка и жидкости во время подготовки к акрированию. Белые полосы, появляющиеся после того как протез отдали пациенту, появляются из-за неправильного замешивания акрилового теста мокрыми/покрытыми кремом руками. Во избежание этой проблемы следует использовать перчатки HDPE.

## 4. Изменение цвета протеза во время эксплуатации

Изменение цвета протезов во время эксплуатации пациентом возникает из-за неправильного ухода. Налёт от курения, употребления кофе, красителей, содержащихся в пище и принимаемые лекарства влияют на уменьшении эстетичности протеза. Во избежание этого следует идеально отполировать протез чтобы уменьшить адгезию и сорбцию веществ в ротовой полости. Также пациенту не следует использовать агрессивные средства для чистки зубных протезов, содержащих окисляющие вещества т.к. это может обелить цвета протеза.

## 5. Возникновение пористой структуры

Случается в том случае, когда наступает нарушение процесса изготовления протеза. Эта проблема может возникнуть на многих этапах процедуры. Во избежание пористости в структуре акрилового вещества следует строго придерживаться указание производителя касаясь процедуры акрирования. Возможные причины возникновения пористой структуры:

- Неправильное соотношение пропорции жидкости к порошку
- Неправильный процесс прессовки акрилового теста в форме под гидравлическим прессом
- Неправильные параметры времени и температуры процесса полимеризации
- Слишком малое количество акрилового теста в кювете
- Модель либо слишком сухая, либо изготовлена из несоответствующего гипса

## 6. Повышение высоты прикуса

Соответствующая высота прикуса – это основа хорошо изготовленного зубного протеза. Для того чтобы она не повышалась, следует придерживаться рекомендаций производителя которые касаются времени прессовки акрилового теста и состояния его консистенции во время помещения оно в кювету. Следует также обратить внимание на следующие важные элементы: на сколько плотно закрывается полимеризационная кювета, а также проконтролировать совместимость элементов перед тем, как поместить/залить акрил в форму.

# АКРИЛЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

## 7. Пластина протеза отстаёт от модели

Причиной отставания пластины протеза от модели является полимеризационная усадка. Это может произойти в случае неправильных пропорций порошка к жидкости а также неправильного процесса полимеризации. Следует обратить особое внимание на температуру, время подогревания и охлаждения кюветы согласно рекомендациям производителя указанным в инструкции употребления.

## 8. Акриловые зубы выпадают с протеза.

Перед процессом полимеризации зубы следует соответствующим образом подготовить. Прислизистая часть акриловых зубов должна быть отполирована при помощи подходящей фрезы или камня. Во время процесса выпаривания воска, каждый зуб должен быть очищен от остатков воска. Перед тем, как поместить/залить акрил в кювету, рекомендуется протереть прислизистую поверхность акриловых зубов мономером.

## 9. Протез часто ломается

Каждое акриловое вещество Everall7 содержит в себе механические свойства, превышающие минимальные требования норм ISO. Проблемы с пониженными механическими свойствами могут возникнуть из-за неправильных пропорций порошка к жидкости, неправильного процесса полимеризации или неправильно запроектированной толщины зубного протеза. Следует также принять во внимание индивидуальные анатомические черты протезного поля пациента или чувствительные пункты, которые могут быть причиной поломки протеза.

## 10. Протез не помещается в ротовой полости пациента

Причиной несовпадения протеза с ротовой полостью пациента может являться полимеризационная усадка или проблема образовалась на этапе неправильно изготовленного и сохраненного слепка. Большое значение имеет и правильно изготовленный слепок для отливки модели. Во избежание ошибок в размерах или поверхности гипсовой модели следует уделить особое внимание на следующие вещи: временной промежуток с момента изготовления слепка до его отливки, а также выбор соответствующего дезинфицирующего средства, безопасного для материал, из которого был изготовлен слепок. Остатки слюны и крови могут нарушить протезное поле в результате чего протез плохо помещается в ротовой полости пациента.

## 11. Аллергические реакции пациента

Каждое акриловое вещество из-за своего химического состава может вызвать аллергическую реакцию у пациента, а именно раздражение, жжение или сухость слизистой оболочки. Причина – содержание остаточного мономера. Если есть информация о чувствительности пациента на остаточный мономер, протез должен быть изготовлен из термопластического материала Villacryl Thermo Press. Чтобы свести на минимум возможность появления аллергической реакции следует:

- Строго соблюдать пропорции порошка к жидкости
- Придерживаться времени и температуры полимеризации
- Перед передачей готового протеза пациенту, протез следует замочить в воде комнатной температуры в течении 48 ч

**Everall7 Sp. z o.o.**  
Augustówka 14  
02-981 Warszawa, Polska  
T +48 22 858 82 72

